





Anleitung für einen Mund-Nasenschutz

Dieser Mund-Nasenschutz ist waschbar und mehrfach verwendbar. Die verarbeiteten Gummibänder sorgen für einen festen Sitz und guten Abschluss zu Nase und Mund. Durchschnittliche Produktionsdauer 30-45min.



Zubehör

Baumwollstoff dicht gewebt 34 x 20 cm Gr. M für die Bänder 17 x 3 cm

optional: leichte Vlieseline H200

16 x 20 cm

Einziehgummi 7mm

Gummikordel 1,5mm od.

biegsamer Basteldraht (optional)

Nähseide

Schere

Maßband

Stecknadeln

Upcycling von Tisch- und Bettwaste, Blusen und Hemden, neue Chancen Blusen und Hemden, neue Chancen für alte Dirndl- und Sommerkleider!






5cm

zusätzliche Dichtheit. Vlieseline 5cm unterhalb der Kante aufbügeln.

Vlieseline-Linie

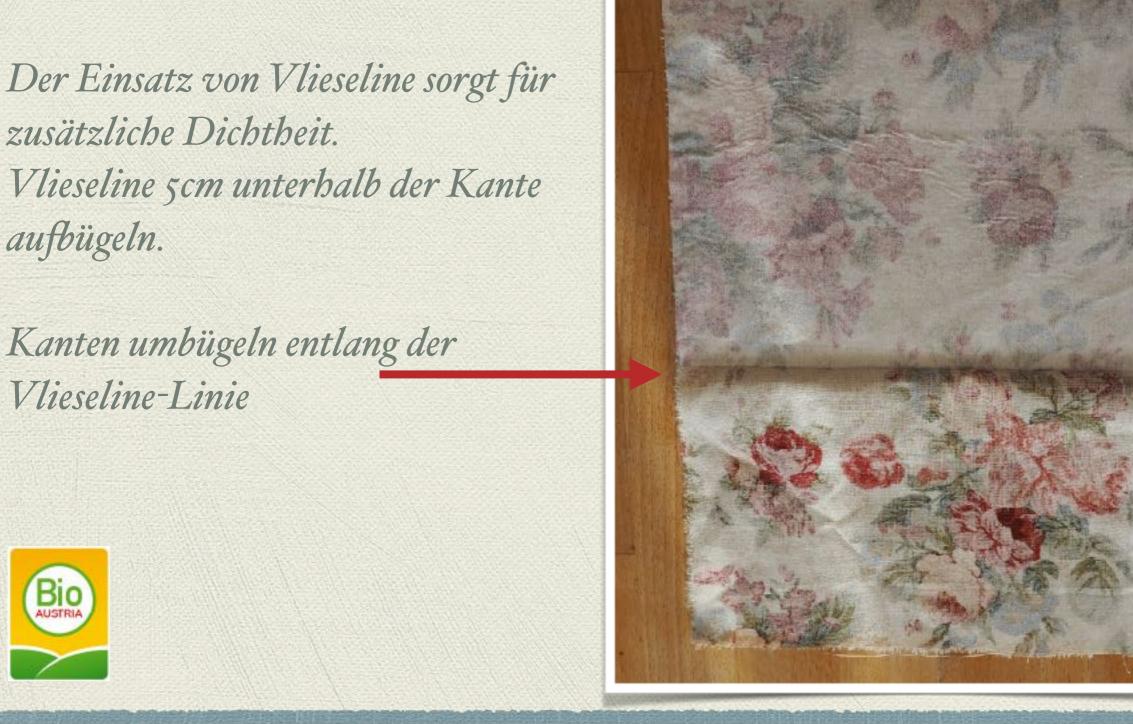









Kanten 1 cm auf die linke Seite bügeln und Kanten absteppen bei Bedarf versäubern oder säumen.
















Faltentiefe: 3 x 1,3 cm
Falten etwas schräg absteppen und
auf 3 mm zurück schneiden.

In die Rückwärtige Lasche kann ein Filtertuch zusätzlich eingesetzt werden.



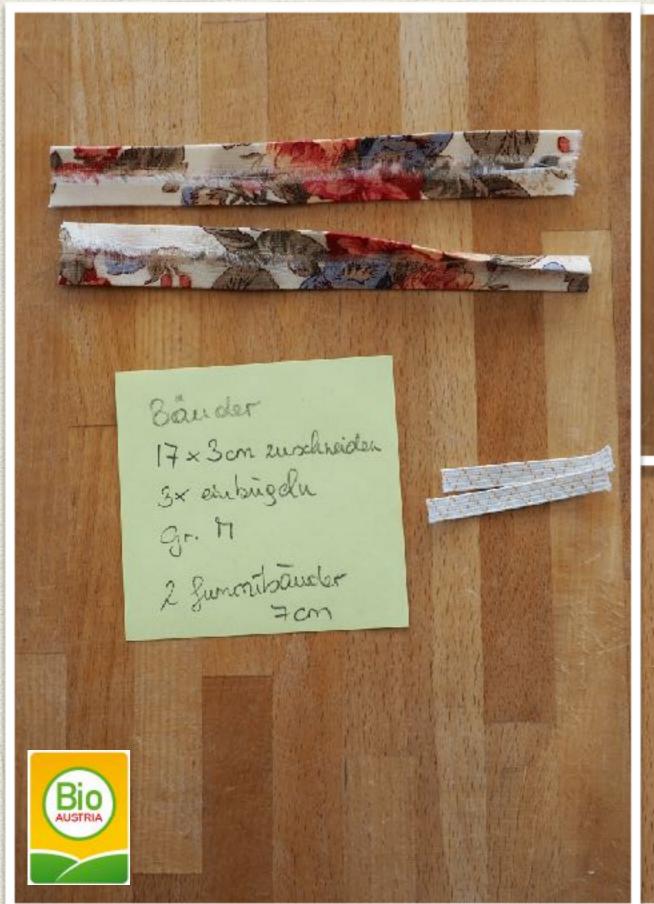

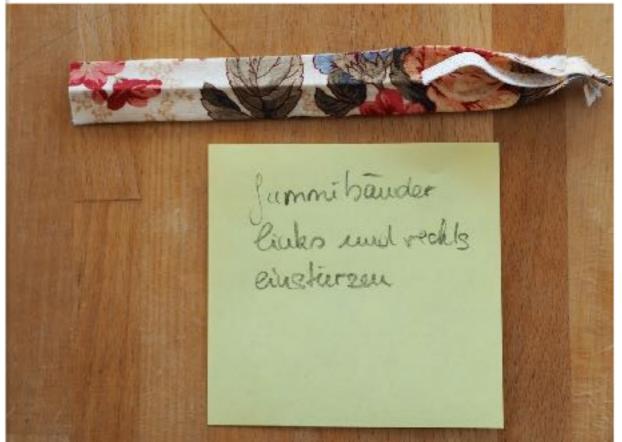

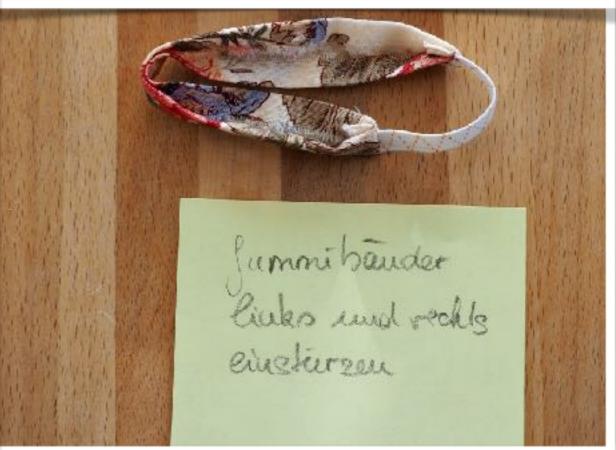





Bänder aufsteppen - Bänderlänge ist abhängig vom Träger, Kinder brauchen kürzere, Männer brauchen 2-3cm längere Bänder! Zusätzlich kann in der rückwärtigen Lasche noch Filtertücher eingelegt werden. Masken mit mind. 60' waschen und ggf. einen Hygienespüler dazu geben.

Viel Spass beim Nähen wünscht BIO AUSTRIA